



ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ ОЧЕЙ
МУЖКА DO OCZU
EYEWASH



**НАСАДКА НА ПЛЯШКУ ДЛЯ ПРОМИВАННЯ
ОЧЕЙ ВІД СЛЬОЗОГІННОГО ГАЗУ АБО ПИЛУ.**

Якщо сльозогінний газ або пил потрапили в очі,
ретельно промийте їх.


**NAKRĘCANA NA BUTELKĘ NASADKA
DO PRZEMYWANIA OCZU Z GAZU
ŁZAWIĄCEGO LUB PYŁU.**

Jeśli do oczu dostanie się gaz łzawiący lub pył,
należy je gruntownie przemyć.

**SCREW-ON CAP FOR WASHING TEAR GAS
OR DUST FROM THE EYES.**

If tear gas or dust gets into your eyes, flush them thoroughly.



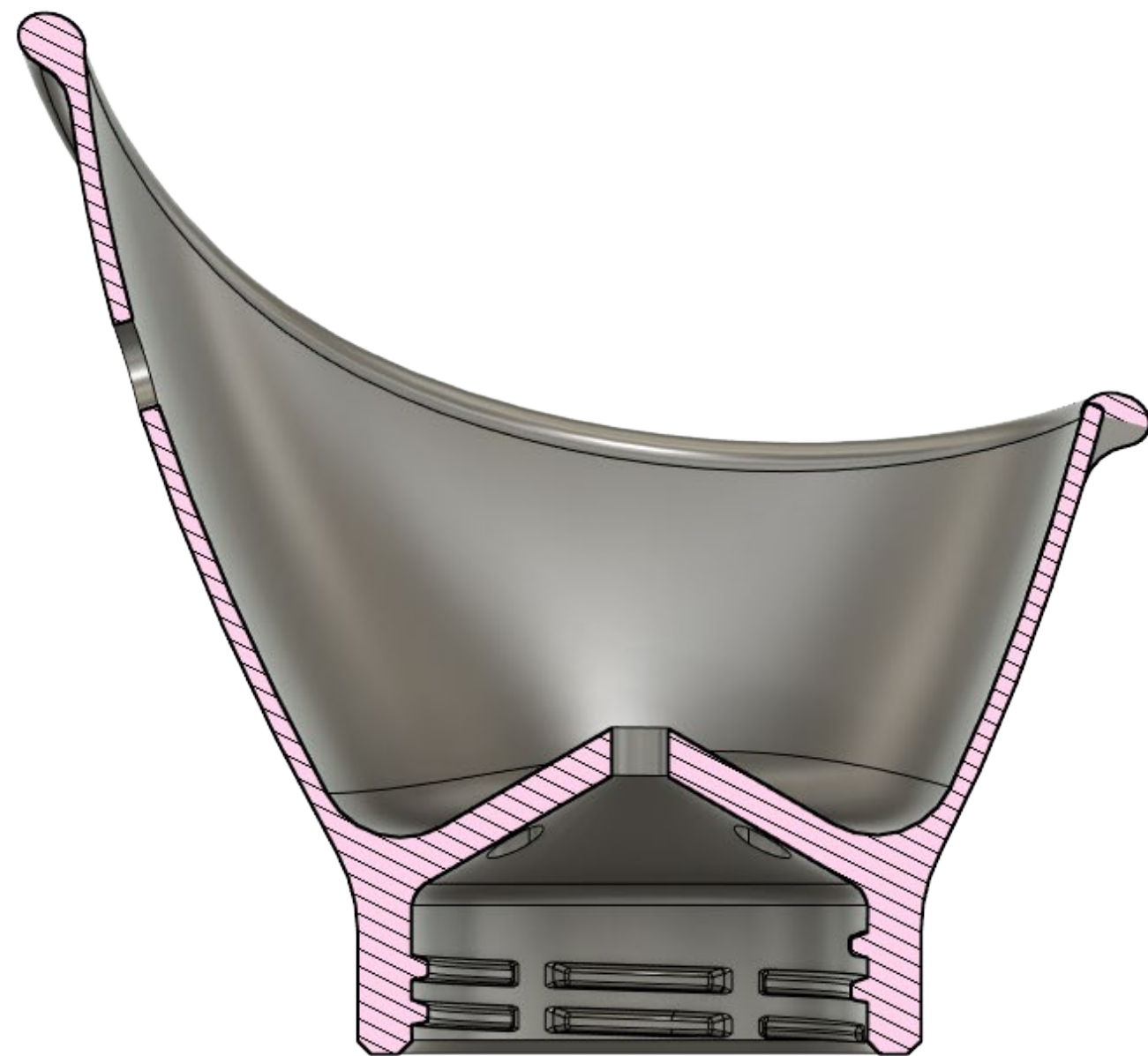

ПАРАМЕТРИ ДРУКУ 3Д

Час друку: 1Гд 30мін

Вид матеріалу PLA або ABS

Кількість матеріалу: 14 гр/ 5 м

Наповнення: 30%

Швидкість друку 80 мм/с, швидкість пересування 120 мм/с

Шар: 0,2 мм

Підпори: ні

PARAMETRY DRUKU 3D

Czas druku: 1h 30min

Rodzaj materiału: PLA lub ABS

Ilość materiału: 14g / 5 m

Wypełnienie: 30%

Prędkość druku: 80 mm/s, prędkość przejazdu: 120 mm/s

Warstwa: 0,2 mm

Podpory: Nie

3D PRINTING PARAMETERS

Printing time: 1h 30min

Material: PLA or ABS

Amount of material: 14 g / 5 m

Infill: 30%

Print speed: 80 mm/s, travel speed: 120 mm/s

Layer: 0,2 mm

Supports: No



1. Накрутіть пристрій для промивання очей на пластикову пляшку, наповнену водою.
Модель адаптована під стандартні пластикові пляшки.



1. Nakręć myjkę na plastikową butelkę wypełnioną wodą.
Model jest przystosowany do standardowych plastikowych butelek.
1. Screw the eyewash onto a plastic bottle filled with water.
The model is suitable for standard plastic bottles.



2.

Прикладіть пристрій до ока, довшою стороною в напрямку скроні. Нахиліть голову так, щоб вода не стікала в інше око.

Намагайтеся якомога ширше відкрити око, яке промиваєте.

Повторіть процес для іншого ока.

2.

Przyłóż myjkę do oka, dłuższą stroną kierując ku skroni. Przechyl głowę w taki sposób, aby woda nie spływała do drugiego oka.

Staraj się możliwie szeroko otwierać przemywane oko.

Powtórz proces dla drugiego oka.

2.

Place the eyewash on your eye with the long side pointing toward your temple.

Tilt your head so that the water does not run into the other eye.

Try to open the eye as wide as possible.

Repeat the process for the other eye.



ПИТАННЯ ЧИ ПРОПОЗИЦІЇ ХОЧЕШ ДОПОМОГТИ У ДРУЦІ

Пиши на HELP.UA@SYGNIS.PL
Знадобиться кожна порада чи пропозиція
Знадобиться кожний принтер 3д

CHCESZ POMÓC, DRUKUJĄC? POMYSŁY NA WYDRUKI?

Napisz do nas na HELP.UA@SYGNIS.PL
Przyda się każda rada, poprawka czy uwaga.
Przyda się każda drukarka 3D.

DO YOU WANT TO HELP BY 3D PRINTING? QUESTIONS OR SUGGESTIONS?

Write to us at HELP.UA@SYGNIS.PL
Any advice, correction or comment will be useful.
Any 3D printer will come in handy.

SYGNIS
SPÓŁKA AKCYJNA